

# SANICID PLUS

DETERGENTE LIMPADOR E DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS. LIMPEZA EFICIENTE E DESINFECÇÃO EM UMA ÚNICA OPERAÇÃO.

## EMBALAGENS DISPONÍVEIS

Frasco 01 Litro  
Bb 05 Litros  
Cx 2x5 Litros  
Cx 4x5 Litros

## PRINCÍPIO ATIVO

Cloreto de Alquil dimetil benzil amônio (6% p/p) + Cloreto de alquil dimetil etilbenzil amônio (6% p/p).

PRAZO DE VALIDADE:  
24 MESES APÓS A  
DATA DE FABRICAÇÃO



## DESCRIÇÃO

SANICID PLUS D&A é um detergente limpador e desinfetante hospitalar a base de quaternário de amônio, desenvolvido para limpeza e desinfecção de superfícies fixas, equipamentos e artigos não críticos. Indicado para hospitais e demais estabelecimentos relacionados com o atendimento a saúde, que buscam por limpeza eficiente e desinfecção em uma única operação. Formulado com a exata combinação de dois específicos quaternário de amônio que proporcionam alto desempenho em um amplo espectro de microrganismos, elimina 99,999% de microrganismos da superfície. Para uso em clínicas, consultórios, hospitais, laboratórios de análises, clínicas odontológicas, de estética, veterinária e demais estabelecimentos relacionados com o atendimento a saúde. Reduz a flora bacteriana. Não corrói superfícies e não agride pisos tratados. É ideal para limpeza e desinfecção de superfícies fixas, tais como, piso, parede, teto, portas, bancadas, escadas, janelas, vidros, luminárias, equipamentos, mobiliários, macas, incubadoras, etc., e artigos não críticos, tais como, termômetro axilar, estetoscópio, suporte de soro, aparelhos de pressão, comadres, papagaios, bacias, cuba rim, cadeiras de banho, etc. SANICID PLUS age com eficácia sobre as bactérias gram-positivas e gram-negativas. Possui ação desinfetante/bactericida comprovada na diluição de 1:500 frente aos seguintes microrganismos: Pseudomonas aeruginosa, Salmonella choleraesuis, Staphylococcus aureus e Escherichia coli. Após Diluído, SANICID PLUS apresenta laudo emitido por laboratório credenciado junto a ANVISA comprovando sua estabilidade, e portanto após diluído, pode ser utilizado em até 24 horas.

## INSTRUÇÕES DE USO

**Limpeza e Desinfecção de superfícies fixas:** Com o auxílio de mop, aplicar o produto já diluído 1:200 (5ml de SANICID PLUS para cada 995ml de água), deixando em contato com a superfície por pelo menos 10 minutos, assegurando-se que toda a área foi coberta com a solução diluída. Pronto a superfície encontra-se limpa e desinfetada. Caso necessário proceder com o enxágue.

**Desinfecção de superfícies fixas:** Lavar, enxaguar e secar a superfície. Com o auxílio de mop, aplicar o produto já diluído 1:500 (2ml de SANICID PLUS para cada 998ml de água), deixando em contato com a superfície por pelo menos 10 minutos, assegurando-se que toda a área foi coberta com a solução diluída. Pronto a superfície encontra-se desinfetada.

**Desinfecção de artigos não críticos:** Lavar, enxaguar e secar os artigos. Imergir-los na solução previamente diluída (1:500) deixando em contato por no mínimo 10 minutos. Enxaguar e secar os artigos. Utiliza-los o mais breve possível. O processo de desinfecção auxilia na redução de maus odores. NÃO UTILIZAR PARA DESINFECÇÃO DE ALIMENTOS. Nota: Após diluído a solução pode ser utilizada em até 24 horas.

## SUPER CONCENTRADO

1 Litro

RENDE ATÉ 500L

DE SOLUÇÃO BACTERICIDA

## DADOS TÉCNICOS

**Aparência:** Líquido transparente

**Cor:** Azul

**Odor:** Característico

**pH:** 4,0 - 6,0

**Densidade:** 0,97 - 1,18 g/ml

**Solubilidade:** 100% solúvel em água

## COMPOSIÇÃO

Cloreto de Alquil dimetil benzil amônio(6%), Cloreto de alquil dimetil etilbenzil amônio(6%), acidificante, corante e veículo.

## PRECAUÇÕES

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS



Sanicid é regularizado junto a ANVISA e está de acordo com a nota técnica GVIMS/ GGTS/ANVISA N°04/2020 publicada em 30/01/2020, e portanto, recomendado na medida de prevenção no combate pelo novo coronavírus(SARS-CoV-2).



**D&A - ISWARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.**

CNPJ: 95.451.605-05 | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10.192.309-68 | Rua Joaquim da Costa Ribeiro, 226 Bairro Alto | CEP 82840-190 | Curitiba | Paraná Fone: 41 3367-9018 | E-mail: dea@deaquimica.com.br Facebook.com/deaquimica | www.deaquimica.com.br

## REGULAMENTAÇÕES

### ANVISA

Produto Saneante Registrado na Anvisa/MS Sob N° 317580055

### MINISTÉRIO DA AGRICULTURA

De acordo com a Instrução Normativa N° 49 de 14 de Setembro de 2006

**EMPRESA POSSUIDORA DE LICENÇA AMBIENTAL E CADASTRADA NO IBAMA**

Responsável Técnico: Deyverton Florentino CRQ 09402992 - 9ª Região - Indústria Brasileira

HIGIENE HOSPITALAR